

REVISICA CUIDAMOS EL PULSO DE SU VIDA

C/Navales 71 28923 Alcorcón • Madrid Tel.: 91 643 34 12 • 678 795 618 e-mail: comercial@rentsica.com www.rentsica.com

FICHA TÉCNICA CALZONCILLO Y PROTECTOR DE CADERA HIPSHIELD



Datos Técnicos:

- Reduce el riesgo de fracturas de caderas
 Hipshield está diseñado para proporcionar protección contra caídas. El protector absorbe el golpe tras una caída o colisíon.
- Su tecnología fue desarrollado originalmente para la protección de motociclistas.
- El protector marcado CE tiene una estructura de panal llena de células de aire.
- Estas células juntas forman una serie de mini amortiguadores que absorben y separan el choque.
- El protector está diseñado para que se ajuste perfectamente a todas las caderas.





- El protector se coloca con ropa interior especial de Hipshield.
- Póngase la braga o el calzoncillo con la etiqueta Hipshield hacia adelante.
- Deslice los protectores en los dos compartimentos a los lados de la braga o el calzoncillo con el lado más ancho hacia arriba y la estructura brillante en el exterior.
- Asegúrese de colocar el protector correctamente.
- Adecuado para tanto hombres como mujeres.
- Determine su talla adecuada midiendo el contorno de su cintura.
- Instrucciones de lavado:
- Debe lavar los protectores a mano con agua tibia y jabón. Luego deje secar durante 10 minutos. Puede lavar la ropa interior en la lavadora (o lavar a mano) a un máximo de 60 ° C.
- DISPONIBLE EN LAS TALLAS : S, M, L, XL, XXL