

FICHA TÉCNICA

JUEGO DE BARANDILLAS SEGMENTADAS ACERO (4 uds)



DESCRIPCIÓN:

Nuestras barandillas son fáciles de usar y seguras, ya que su sistema de fijación se desliza al abatirlas, y el exclusivo diseño de seguridad evita accidentes y pinzamientos.

Características Técnicas:

El amarre está preparado para el bastidor de 50x20mm.

Recubrimiento Pintura Epoxi-Poliéster.

Sistema de bloqueo automático en su posición elevada.

PESO 22.80 kg

En el montaje deben respetarse las siguientes medidas de seguridad:

- distancia entre la barandilla y la cara interna del cabecero: menor de 60mm.
- distancia entre la barandilla y la cara interna del piecero: menor de 60mm. o mayor de 318mm.
- distancia entre cara superior del colchón y parte superior de la barandilla: mayor o igual a 220mm.
- huecos entre barras, o entre la barra inferior y la base del colchón: menor de 120mm.
- distancia entre barandillas segmentadas elevadas: menor de 60mm o mayor de 318mm.
- longitud de barandilla: superior al 50% de la longitud del somier.

INFORMACIÓN DE MONTAJE

Cada parte de la barandilla es distinta y vienen identificadas con una pegatina para facilitar su colocación.

La referencia siempre es, Paciente tumbado en la cama y tirador rojo en la cabecera.
Tenemos:

- CABECERA DERECHA, PIECERA DERECHA (Barandilla derecha)
- CABECERA IZQUIERDA, PIECERA IZQUIERDA (Barandilla izquierda)

Colocar los amarres en forma de "U" en los laterales de la cama, en el bastidor.

Pasar el tornillo hexagonal (entre bastidor y tornillo, colocar la arandela) por los agujeros de los amarres, con la cabeza hacia el exterior de la cama.

Poner la contratuerca y apretar con llave fija de 17.

Ajustar la barandilla con el tope (tornillo plástico blanco) para evitar que la bandilla se venga hacia afuera.

*De fábrica viene ajustado, pero puede ser necesario ajustarlo más, una vez colocada.

Para plegar la barandilla, se aconseja empujarla suavemente hacia el interior de la cama y después tirar del tirador rojo para plegarla.