

FICHA TÉCNICA

RECEPTOR 3 USUARIOS

Descripción:

El receptor P168 Plesio Pager se puede usar para monitorizar los sistemas de Alert-it en domicilios particulares, o entornos similares en los cuales no se van a monitorizar más de tres sistemas. Encendido del receptor Importante: Durante el envío el receptor Plesio Pager puede que pierda un poco de carga, así que se recomienda cargar el receptor antes de su uso. (ver el dorso). Para encender el Receptor pulse el botón ON/OFF durante 3 segundos. El receptor emitirá un pitido y parpadearán una vez los tres leds. El led VERDE "Pager" parpadeará cada 8 segundos para mostrar que el receptor está preparado para emparejar un dispositivo.



Si el receptor se enciende y está emparejado con un monitor en modo de conexión continua (modo RF), el led rojo "Monitor" del receptor se encenderá cada 8 segundos y si está conectado de forma estándar solamente se encenderá cuando reciba una señal de un monitor

Características técnicas Receptor

- Alimentación: 1.3mm 9V DC
- Peso: 144 gr
- Material: Plástico ABS blanco, antimicrobiano
- Dimensiones: 120 x 70 x 20 mm (Altura x Ancho x Profundidad)
- Batería: 2 x AA (HR6) Ni-MH recargables 2500 mAh
- Duración batería: 80 horas (100 normalmente)
- Tiempo de carga: 12 horas

El sistema cumple con 93/42/EEC como accesorio adecuado para asistir dispositivos médicos con uso en entornos de atención médica domiciliaria

El sistema cumple con EN60601 de Seguridad Eléctrico de clase 2 (no necesita toma de tierra) el Grupo 1 de clase B para compatibilidad electromagnética en un entorno de atención médica domiciliaria

El sistema tiene un receptor de radio que cumple con EN300-220 que opera a 434.075MHz de banda ancha.