

FICHA TÉCNICA

CINTURON ABDOMINAL A SILLA CIERRE TRIDENTE MOD. ORTX



El cinturón abdominal está fabricado con material de tres capas (acrílico, espuma y poliéster). Este cinturón cuenta con cinchas de regulación y sujeción con hebillas de cierres de diferentes colores, lo que facilita su colocación. Su diseño funcional permite un ajuste personalizado sin necesidad de abrir los cierres, brindando comodidad y seguridad al usuario.

INDICACIONES cinturón abdominal:

El cinturón abdominal está indicado para pacientes con inestabilidades antero-laterales, pudiendo adaptarse a sillas de ruedas, diferentes tipos de sillas y sillones de descanso. Proporciona estabilidad y sujeción adecuada, mejorando la postura y la seguridad del paciente.

INSTRUCCIONES DE LAVADO:

Para mantener el cinturón abdominal en óptimas condiciones, sigue estas instrucciones de lavado:

1. Pegar los velcros: Antes de lavar, asegúrate de pegar los velcros entre sí para evitar que se enganchen o dañen durante el lavado.
2. Lavado a mano: Lava el cinturón periódicamente a mano, utilizando agua fría y jabón neutro. Esto garantizará una limpieza suave y efectiva.
3. Secado: Después del lavado, deja que el cinturón se seque al aire libre a temperatura ambiente. Evita tenderlo o plancharlo, ya que podría afectar su forma y funcionalidad.
4. Cuidado adicional: Durante el uso y la limpieza del cinturón, evita el uso de alcoholes, pomadas o líquidos disolventes, ya que pueden dañar los materiales. Además, asegúrate de escurrir bien el cinturón después del lavado para evitar la irritación de la piel y el deterioro del producto.